

EXTENSÃO COM FILTRO PARA CONDUÇÃO DE GASES

1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Extensão intermediária para a condução de gases (CO₂; O₂...).

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Extensão em PVC cristal, com filtro 0,2 micra para barreira microbiológica e conector tipo luerlock, com tampa protetora na extremidade proximal.

3. RECOMENDAÇÕES/PRECAUÇÕES:

3.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas, comunique imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.

3.2. O fabricante recomenda o uso único. Lembre-se: Produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.

3.3. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa.

3.4. A Zammi Instrumental EIRELI não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

4. ADVERTÊNCIAS:

4.1. Verificar se as conexões dos dispositivos aos quais a extensão será conectada são compatíveis com as conexões da mesma, para evitar risco de vazamento.

4.2. Checar o posicionamento dos tubos quanto ao acotovelamento, para evitar obstrução ou aumento de pressão na linha.

4.3. Este produto é indicado para uso somente com O₂, CO₂, N₂ ou outros gases inertes, passíveis de serem administradas ao paciente. O produto não deve ser utilizado com outro tipo de gás.

5. INSTRUÇÕES DE USO:

5.1. Examinar o produto antes de utilizá-lo.

5.2. Conectar a extremidade proximal da extensão ao instrumental cirúrgico.

5.3. Conectar a extremidade distal da extensão à fonte do gás (CO₂; O₂ ...).

5.4. Certifique-se de que as conexões estejam bem fixas.

5.5. Abrir a rede de gás, mantendo o nível pressórico desejado.

6. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

6.1. Evite calor excessivo.

6.2. Armazene somente em local limpo e seco.

6.3. Proteja da luz e umidade (Umidade: 70% +/- 10).

7. ACONDICIONAMENTO:

7.1. Produto embalado em filme de polipropileno/poliéster e papel grau cirúrgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Estéril.

Fabricado por:

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - comercial@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 - I.E: 82.340.777 – AFE: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

Produto isento de látex.

O fabricante recomenda uso único.

Esterilizado a Óxido de Etileno.

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350093

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:

www.zammi.com.br