

## FRASCO PARA COLETA DE AMOSTRA

### BRONCOZAMM

#### 1. INDICAÇÃO

Produto indicado para coleta de amostra por aspiração das vias aéreas.

#### 2. DESCRIÇÃO

Frasco coletor graduado rígido, transparente e atóxico. Extensão em PVC atóxico para conexão com a sonda de aspiração, tampa com rosca, conector e etiqueta do paciente.

#### 3. RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

- 3.1 Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e aprirogenicidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e /ou vazamentos. Em caso de dúvidas, comunique imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.
- 3.2 Certifique-se do ajuste das conexões de montagem.
- 3.3 Verifique se o material coletado realmente se trata e secreção traqueal e/ou LBA para que não sejam gerados resultados inexatos no exame.
- 3.4 O fabricante recomenda uso único. Lembre-se: produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
- 3.5 É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa.
- 3.6 A Zammi Instrumental EIRELI não é responsável por danos causados por imperícia ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

#### 4. INSTRUÇÕES DE USO

**Atenção: utilize técnica asséptica ao manusear o produto.**

- 4.1 Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 4.2 Conecte a linha de aspiração ao conector fixado à via lateral da tampa do frasco coletor.
- 4.3 Conecte a extensão de PVC do frasco coletor à sonda de aspiração ou ao broncoscópio.
- 4.4 Proceda à aspiração com rigor asséptico.
- 4.5 Verifique se o volume de material necessário foi obtido, se não, proceda à nova aspiração.
- 4.6 Após a aspiração, desconecte o produto da sonda e da linha de aspiração.
- 4.7 Retire o conector, conecte a extensão de PVC à via lateral da tampa do frasco.
- 4.8 Utilize a etiqueta sobresalente para identificar a situação do frasco coletor com informações relativas às amostras e ao paciente.

#### 5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- 5.1 Evite o calor excessivo.
- 5.2 Proteja da luz e umidade.

#### 6. ACONDICIONAMENTO

- 6.1 Produto acondicionado em filme de polipropileno/poléster e papel grau cirurgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto.

Fabricado por:

**ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI**

Rua: Bernardo de Vasconcelos,992 – Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.251-300

CNPJ: 30.450.803/0001/09 I.E.: 82.340.777 ANVISA: 102.163-5

Telefone: (21) 2677-1500 – zammi@zammi.com.br

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto isento de látex.

“O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350096

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site: [www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)