

IRRIGAZAMM

Equipo para Irrigação

1. INDICAÇÃO DO PRODUTO

Produto indicado para irrigação de cavidades e/ou perfusão de órgãos em cirurgias com aplicação de técnicas de endoscopia.

A principal finalidade deste produto é conduzir soluções cristalóides para limpeza da cavidade cirúrgica para distender a cavidade e mantê-la lavada de sangue e corpos (partículas), com o sangramento controlado.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Equipo com 2 ou 4 vias com extensão com comprimentos e diâmetros variados; pontas perfurantes com tampas protetoras; pinça corta fluxo em cada uma das vias; adaptador para conexão com o canal de trabalho.

O produto pode ser fornecido nos seguintes modelos:

Irrigazamm
Irrigazamm Artrozamm
Irrigazamm C

O número de vias, o diâmetro e o comprimento das extensões de pvc, fornecido de acordo com o pedido do cliente.

3. INSTRUÇÕES DE USO

(ATENÇÃO: “Esta instrução de uso aplica-se a todos os modelos do produto aqui apresentados.”)

- 3.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 3.2. Feche os clamps das derivações.
- 3.3. Retire os protetores das extremidades adaptadoras.
- 3.4. Conecte as extremidades adaptadoras aos frascos de solução.
- 3.5. Selecione as ampolas contendo a solução a ser administrada.
- 3.6. Abra os clamps das derivações para permitir o preenchimento das linhas de irrigação e/ou perfusão.
- 3.7. Feche os clamps das derivações, após verificar se a linha está totalmente preenchida.
- 3.8. Proceda a seguinte conexão, conforme aplicação específica:
 - 3.8.1. Irrigação em cirurgias:
 - 3.8.1.1. Conecte a linha de infusão central ao canal de trabalho do equipamento.
 - 3.8.2. Irrigação pós-cirúrgica:
 - 3.8.2.1. Conecte a linha de infusão central à cânula ou à sonda.
 - 3.8.3. Transplante de órgãos:
 - 3.8.3.1. Conecte a linha de infusão central à cânula fixada ao órgão do doador a ser perfundido.
- 3.9. Proceda a irrigação e/ou perfusão.

4. PRECAUÇÕES

- 4.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas, comunique imediatamente o fabricante para que providências sejam tomadas.
- 4.2. Certifique-se da ausência de bolhas de ar no circuito antes de iniciar o procedimento.
- 4.3. Atenção quanto ao volume de solução nos frascos (Obs.: O volume deve estar de acordo com a prescrição médica. Deve-se tomar cuidado para que os frascos não fiquem vazios; impedindo o fluxo de líquidos - soluções salinas).
- 4.4. Verifique se não há vazamento nas conexões.
- 4.5. Descarte o produto após o uso. Não reutilize ou reesterilize. Lembre-se: produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
- 4.6. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa.
- 4.7. A Zammi Instrumental Eireli não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- 5.1. Evite calor excessivo (temperatura máxima recomendada: 30°C)
- 5.2. Proteja da luz e umidade.

6. ACONDICIONAMENTO

- 6.1. Produto acondicionado em filme de polietileno, polietileno/poliéster e papel grau cirúrgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Estéril.

Fabricado por:

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - E-mail: zammi@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 – I.E: 82.340.777 – ANVISA: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca - CREA-RJ: 1992101441

“Esterilizado a Óxido de Etileno”

“Produto de uso único”

“Proibido reprocessar”

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350077

Pra mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:
www.zammi.com.br