

## DRENO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA

### DRENOSUCZAMM

#### 1. INDICAÇÃO:

Aspiração convencional em centro cirúrgico.

#### 2. DESCRIÇÃO:

- Ponteira (cânula) para aspiração cirúrgica, com regulador de fluxo
- Extensão em PVC, com conector flexível

#### 3. RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

3.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequadas podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas, comunique à fábrica para que providências sejam tomadas.

3.2. Descarte o produto após o uso. Não reutilize ou reesterilize. Proibido reprocessar. Lembre-se: produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.

3.3. É recomendável o usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenamento inadequados não são de responsabilidade da empresa.

3.3. A ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

#### 4. INSTRUÇÕES DE USO:

4.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.

4.2. Conecte a extremidade da extensão ao frasco coletor do dreno de aspiração cirúrgica.

4.3. Realize a aspiração no pré-operatório, mantendo a cânula o mais próximo possível do material a ser aspirado.

4.4. Controle a pressão de aspiração através do regulador de punho existente na cânula.

#### 5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

5.1. Evite calor excessivo.

5.2. Proteja da luz e umidade

#### 6. ACONDICIONAMENTO:

Produto embalado em filme de polietileno, filme de polipropileno/ poliéster e papel grau cirúrgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Estéril (Esterilizado a Óxido de Etileno).

## INSTRUÇÕES DE USO



**Fabricado por:**

**ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.**

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - comercial@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 - I.E: 82.340.777 – AFE: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

**Produto de uso único - Proibido reprocessar**

Esterilizado a Óxido de Etileno

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350054

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o produto.

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:

[www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)