

ANEXO III.B

COLETOR DESCARTÁVEL – MULTIZAMM ECO – não estéril**1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:**

Produto indicado para coleta de material aspirado que não deve ser reaproveitado durante o ato cirúrgico.

- Bloqueia a aspiração quando o nível está no limite.
- Elimina o risco de contaminação da linha de vácuo.
- Previne o jateamento da secreção.
- Viabiliza o descarte do coletor sem o risco de derramamento do material aspirado.
- Fácil manuseio.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Composto por:

Coletor descartável (succion liner), nas capacidades de 1000ml, 2000ml e 3000ml, com válvula unidirecional, filtro (nos modelos que contém) e alça para remoção acoplados à tampa. Não estéril.

Acessórios de uso exclusivo:

Frasco rígido transparente graduado, nas capacidades de 1000 ml, 2000 ml e 3000 ml. Não estéril.
Carrinho (trolley). Não estéril.

3. RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

- 3.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa. Em caso de dúvidas, comunique imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.
- 3.2. Certifique-se do ajuste das conexões de montagem.
- 3.3. Para os modelos com filtro recomenda-se: Clampeie a linha de aspiração e abra o vácuo para verificar o funcionamento do filtro. O filtro tem o objetivo de bloquear a aspiração automaticamente quando o nível máximo é atingido.
- 3.4. Em qualquer situação irregular, como a falta de pressão ou danificação do frasco rígido ou do coletor, não utilize o produto.
- 3.5. É recomendável manter um refil sobressalente próximo, caso necessite uma troca rápida.
- 3.6. Troque o coletor sempre que necessário.
- 3.7. O fabricante recomenda uso único. Lembre-se: Produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
- 3.8. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto.
- 3.9. A Zammi Instrumental EIRELI não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

4. INSTRUÇÕES DE USO:**4.1. Montagem:**

- 4.1.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 4.1.2. Abra a embalagem cirúrgica do coletor.

Atenção: Observar o número de controle da versão: IFU.00 - 10216350094

- 4.1.3. Introduza o coletor no frasco rígido.
- 4.1.4. Conecte o tubo da fonte de vácuo à tampa.
- 4.1.5. Retire o protetor do conector da via do paciente na tampa do coletor.
- 4.1.6. Conecte a linha do paciente ao conector da tampa do coletor.
- 4.1.7. Proceda à aspiração.

4.2. Descarte da secreção:

- 4.2.1. Desconecte a linha do paciente.
- 4.2.2. Coloque o protetor no conector da via do paciente na tampa do coletor.
- 4.2.3. Desligue o vácuo.
- 4.2.4. Remova o coletor do frasco rígido, puxando-o pela alça plástica das bordas da tampa.
- 4.2.5. Despreze o coletor contendo a secreção em local apropriado, conforme normas do Hospital.

5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

- 5.1. Evite calor excessivo.
- 5.2. Proteja da luz e umidade.

6. ACONDICIONAMENTO:

O coletor é acondicionado em embalagem plástica. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Não estéril.

Validade do produto: 02 anos após a data de fabricação.

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - comercial@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 - I.E: 82.340.777 – AFE: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

Esterilizado a Óxido de Etileno

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350094

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:
www.zammi.com.br