

IRRIGAZAMM DUO

1. DESCRIÇÃO

O Irrigazamm DUO é um conjunto de linhas paralelas desenvolvidas para irrigação e aspiração cirúrgicas simultâneas.

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO


O dispositivo funciona conectado a uma fonte de vácuo para aspiração e conectado a um frasco ou bolsa de soro para irrigação.

3. INDICAÇÃO

Irrigação e aspiração em procedimentos cirúrgicos de videocirurgia.

4. COMPOSIÇÃO

1. Ponta perfuradora
2. Extensão com marcação azul
3. Conector Luer-Lock
4. Pinça
5. Conector flexível
6. Extensão cristal

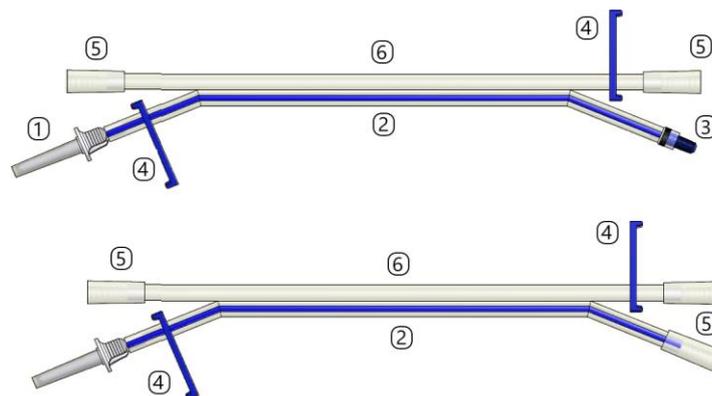

5. INSTRUÇÃO DE USO

Abra a embalagem utilizando técnica asséptica;

Pince a linha de irrigação;

Conecte a linha Azul ao frasco ou bolsa de soro utilizando a ponta perfuradora;

Conecte a linha de aspiração ao frasco de aspiração e aguarde o comando do cirurgião para iniciar o procedimento;

Abra a fonte de vácuo para a iniciar a aspiração;

Abra a pinça da linha Azul para iniciar a irrigação;

Feche linha Azul para realizar a substituição de frasco ou bolsa de soro vazio.

Após a utilização, descarte o produto de acordo instrução de GRSS do Hospital e ANVISA.

6. ADVERTÊNCIAS

- Este produto somente deve ser utilizado sob prescrição médica.
- Este produto só deve ser utilizado por profissional treinado em procedimentos de videolaparoscopia.
- Antes de utilizar, verifique se o produto é o modelo correto.

INSTRUÇÃO DE USO

- Verifique se a embalagem esta integra, verifique a data de validade do produto.
- Não utilize produto com embalagem danificada ou violada, ou com data de validade expirada.
- Não utilizar se o produto for contaminado acidentalmente.
- O FABRICANTE não se responsabiliza por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria.
- O Fabricante não se responsabiliza pelo uso diferente da indicação de uso especifica na instrução de uso.
- Não reutilize ou reesterilize.
- Abrir a embalagem somente no momento do uso.
- Descarte o produto após o uso.
- Descarte o produto como lixo hospitalar. RSS do Grupo A.

7. PRECAUÇÕES

Leia e siga as instruções de uso antes de utilizar o produto.

Realize a perfuração do frasco de soro com bastante cautela para evitar a contaminação acidental da ponta perfuradora.

8. CUIDADOS NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente.

Proteja da luz e umidade.

9. FORMA DE DESCARTE

Após o uso, o produto pode ser contaminado com resíduos de material biológico, potencialmente infectante. Assim deve ser manipulado como Resíduo Grupo A da RDC nº 222/ 2018.

10. SÍMBOLOS E LEGENDAS

	Proteja da luz solar.
	Proteja da humidade
	Este lado para cima.
	Frágil, manusear com cuidado.

11. FABRICAÇÃO

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 E-mail: zammi@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 – I.E: 82.340.777 – ANVISA: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

Cadastro Anvisa: 10216359014

Produto isento de látex.