

INSTRUÇÕES DE USO

EXTENSÃO PARA INFUSÃO - EXTENSOZAMM

1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Extensão intermediária para infusão de soluções (soro fisiológico 0,9% ou água para injeção, com ou sem a adição de medicamentos, nutrição parenteral...) permitindo maior área de mobilização do paciente, sem tracioná-lo.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto composto por:

Tubo extensor em PVC atóxico, em tamanhos e número de vias variados.

Conectores fêmea ou macho do tipo luer-slip ou luer-lock.

Pinça (acessório opcional).

Modelos disponíveis conforme tabela abaixo:

Código	Nº de Vias	Tipo de Entrada	Tipo de Saída	Comprimento do Tubo Extensor	Presença de Pinça	Nº de pinças
8300	1	Fêmea	Macho Slip	5 cm	Não	0
8300P	1	Fêmea	Macho Slip	5 cm	Sim	1
8301	1	Fêmea	Macho Slip	15 cm	Não	0
8301P	1	Fêmea	Macho Slip	15 cm	Sim	1
8302	1	Fêmea	Macho Slip	30 cm	Não	0
8302P	1	Fêmea	Macho Slip	30 cm	Sim	1
8303	1	Fêmea	Macho Slip	60 cm	Não	0
8303P	1	Fêmea	Macho Slip	60 cm	Sim	1
8304	1	Fêmea	Macho Slip	90 cm	Não	0
8304P	1	Fêmea	Macho Slip	90 cm	Sim	1
8305	1	Fêmea	Macho Slip	120 cm	Não	0
8305P	1	Fêmea	Macho Slip	120 cm	Sim	1
8306	1	Fêmea	Macho Slip	150 cm	Não	0
8306P	1	Fêmea	Macho Slip	150 cm	Sim	1
8307	1	Fêmea	Macho Slip	180 cm	Não	0
8307P	1	Fêmea	Macho Slip	180 cm	Sim	1
8308	1	Fêmea	Macho Slip	210 cm	Não	0
8308P	1	Fêmea	Macho Slip	210 cm	Sim	1
8309	1	Fêmea	Macho Slip	240 cm	Não	0
8309P	1	Fêmea	Macho Slip	240 cm	Sim	1
8310	1	Fêmea	Macho Lock	5 cm	Não	0
8310P	1	Fêmea	Macho Lock	5 cm	Sim	1
8311	1	Fêmea	Macho Lock	15 cm	Não	0
8311P	1	Fêmea	Macho Lock	15 cm	Sim	1
8312	1	Fêmea	Macho Lock	30 cm	Não	0
8312P	1	Fêmea	Macho Lock	30 cm	Sim	1
8313	1	Fêmea	Macho Lock	60 cm	Não	0
8313P	1	Fêmea	Macho Lock	60 cm	Sim	1
8314	1	Fêmea	Macho Lock	90 cm	Não	0
8314P	1	Fêmea	Macho Lock	90 cm	Sim	1
8315	1	Fêmea	Macho Lock	120 cm	Não	0
8315P	1	Fêmea	Macho Lock	120 cm	Sim	1
8316	1	Fêmea	Macho Lock	150 cm	Não	0
8316P	1	Fêmea	Macho Lock	150 cm	Sim	1

Representante Legal

Responsável Técnico

INSTRUÇÕES DE USO

EXTENSÃO PARA INFUSÃO - EXTENSOZAMM

8317	1	Fêmea	Macho Lock	180 cm	Não	0
8317P	1	Fêmea	Macho Lock	180 cm	Sim	1
8318	1	Fêmea	Macho Lock	210 cm	Não	0
8318P	1	Fêmea	Macho Lock	210 cm	Sim	1
8319	1	Fêmea	Macho Lock	240 cm	Não	0
8319P	1	Fêmea	Macho Lock	240 cm	Sim	1
8320	1	Macho Slip	Macho Slip	5 cm	Não	0
8320P	1	Macho Slip	Macho Slip	5 cm	Sim	1
8321	1	Macho Slip	Macho Slip	15 cm	Não	0
8321P	1	Macho Slip	Macho Slip	15 cm	Sim	1
8322	1	Macho Slip	Macho Slip	30 cm	Não	0
8322P	1	Macho Slip	Macho Slip	30 cm	Sim	1
8323	1	Macho Slip	Macho Slip	60 cm	Não	0
8323P	1	Macho Slip	Macho Slip	60 cm	Sim	1
8324	1	Macho Slip	Macho Slip	90 cm	Não	0
8324P	1	Macho Slip	Macho Slip	90 cm	Sim	1
8325	1	Macho Slip	Macho Slip	120 cm	Não	0
8325P	1	Macho Slip	Macho Slip	120 cm	Sim	1
8326	1	Macho Slip	Macho Slip	150 cm	Não	0
8326P	1	Macho Slip	Macho Slip	150 cm	Sim	1
8327	1	Macho Slip	Macho Slip	180 cm	Não	0
8327P	1	Macho Slip	Macho Slip	180 cm	Sim	1
8328	1	Macho Slip	Macho Slip	210 cm	Não	0
8328P	1	Macho Slip	Macho Slip	210 cm	Sim	1
8329	1	Macho Slip	Macho Slip	240 cm	Não	0
8329P	1	Macho Slip	Macho Slip	240 cm	Sim	1
8330	1	Macho Lock	Macho Lock	5 cm	Não	0
8330P	1	Macho Lock	Macho Lock	5 cm	Sim	1
8331	1	Macho Lock	Macho Lock	15 cm	Não	0
8331P	1	Macho Lock	Macho Lock	15 cm	Sim	1
8332	1	Macho Lock	Macho Lock	30 cm	Não	0
8332P	1	Macho Lock	Macho Lock	30 cm	Sim	1
8333	1	Macho Lock	Macho Lock	60 cm	Não	0
8333P	1	Macho Lock	Macho Lock	60 cm	Sim	1
8334	1	Macho Lock	Macho Lock	90 cm	Não	0
8334P	1	Macho Lock	Macho Lock	90 cm	Sim	1
8335	1	Macho Lock	Macho Lock	120 cm	Não	0
8335P	1	Macho Lock	Macho Lock	120 cm	Sim	1
8336	1	Macho Lock	Macho Lock	150 cm	Não	0
8336P	1	Macho Lock	Macho Lock	150 cm	Sim	1
8337	1	Macho Lock	Macho Lock	180 cm	Não	0
8337P	1	Macho Lock	Macho Lock	180 cm	Sim	1
8338	1	Macho Lock	Macho Lock	210 cm	Não	0
8338P	1	Macho Lock	Macho Lock	210 cm	Sim	1
8339	1	Macho Lock	Macho Lock	240 cm	Não	0
8339P	1	Macho Lock	Macho Lock	240 cm	Sim	1
8340	1	Fêmea	Fêmea	5 cm	Não	0
8340P	1	Fêmea	Fêmea	5 cm	Sim	1
8341	1	Fêmea	Fêmea	15 cm	Não	0
8341P	1	Fêmea	Fêmea	15 cm	Sim	1

Representante Legal

Responsável Técnico

INSTRUÇÕES DE USO

EXTENSÃO PARA INFUSÃO - EXTENSOZAMM

8342	1	Fêmea	Fêmea	30 cm	Não	0
8342P	1	Fêmea	Fêmea	30 cm	Sim	1
8343	1	Fêmea	Fêmea	60 cm	Não	0
8343	1	Fêmea	Fêmea	60 cm	Sim	1
8343	1	Fêmea	Fêmea	60 cm	Não	0
8343	1	Fêmea	Fêmea	60 cm	Sim	1
8345	1	Fêmea	Fêmea	120 cm	Não	0
8345P	1	Fêmea	Fêmea	120 cm	Sim	1
8346	1	Fêmea	Fêmea	150 cm	Não	0
8346	1	Fêmea	Fêmea	150 cm	Sim	1
8347	1	Fêmea	Fêmea	180 cm	Não	0
8347	1	Fêmea	Fêmea	180 cm	Sim	1
8348	1	Fêmea	Fêmea	210 cm	Não	0
8348	1	Fêmea	Fêmea	210 cm	Sim	1
8349	1	Fêmea	Fêmea	240 cm	Não	0
8349P	1	Fêmea	Fêmea	240 cm	Sim	1
8350	2	Fêmea	Macho Slip	5 cm	Não	0
8350P	2	Fêmea	Macho Slip	5 cm	Sim	3
8351	2	Fêmea	Macho Lock	15 cm	Não	0
8351P	2	Fêmea	Macho Lock	15 cm	Sim	3
8352	3	Fêmea	Macho Slip	30 cm	Não	0
8352P	3	Fêmea	Macho Slip	30 cm	Sim	4
8353	3	Fêmea	Macho Lock	60 cm	Não	0
8353P	3	Fêmea	Macho Lock	60 cm	Sim	4
8354	4	Fêmea	Macho Slip	90 cm	Não	0
8354P	4	Fêmea	Macho Slip	90 cm	Sim	5
8355	4	Fêmea	Macho Lock	120 cm	Não	0
8355P	4	Fêmea	Macho Lock	120 cm	Sim	5
8356	6	Fêmea	Macho Slip	150 cm	Não	0
8356P	6	Fêmea	Macho Slip	150 cm	Sim	7
8357	6	Fêmea	Macho Lock	180 cm	Não	0
8357P	6	Fêmea	Macho Lock	180 cm	Sim	7
8358	8	Fêmea	Macho Slip	210 cm	Não	0
8358P	8	Fêmea	Macho Slip	210 cm	Sim	9
8359	8	Fêmea	Macho Lock	240 cm	Não	0
8359P	8	Fêmea	Macho Lock	240 cm	Sim	9

3. RECOMENDAÇÕES

- 3.1. Leia as instruções atentamente antes de utilizar o produto.
- 3.2. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da ZAMMI.
- 3.3. O produto deve ser manuseado de acordo com normas de assepsia.
- 3.4. Não devem ser utilizados para assepsia produtos como: álcool, acetona, etc...
- 3.5. O produto não deve ser exposto a temperaturas inferiores à 0°C (32°F) ou superiores a 60°C (140°F).
- 3.6. É recomendável ter disponível outro produto para o caso de necessidade durante a montagem.

INSTRUÇÕES DE USO

EXTENSÃO PARA INFUSÃO - EXTENSOZAMM

3.7. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário.

4. PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS:

4.1. Verificar cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas, não utilize o produto e comunique imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.

4.2. O produto deve ser utilizado por pessoal treinado.

4.3. Verificar previamente as conexões para prevenir eventuais vazamentos.

4.4. Evitar esforços ou apertos excessivos ao realizar as conexões.

4.5. Remover todo o ar do circuito, antes do início do procedimento.

4.6. Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

5. INSTRUÇÕES DE USO

5.1. Utilizar o modelo mais adequado a sua necessidade, de acordo com o número de vias e comprimento necessário

5.2. Retirar o produto da caixa de transporte.

5.3. Verificar a integridade da embalagem.

5.4. Remover o produto da embalagem.

5.5. Examinar o produto antes de utilizá-lo.

5.6. Adaptar a conexão proximal do Extensozamm ao equipo e a conexão distal ao cateter intravascular do paciente.

6. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

6.1. Evitar calor excessivo

6.2. Proteger da luz e da umidade.

6.3. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequadas não são de responsabilidade da ZAMMI.

7. ACONDICIONAMENTO

7.1. Produto individualmente embalado em filme de polietileno/ filme de poliéster e papel grau cirúrgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Estéril.

8. FABRICADO POR:

Zammi Instrumental Ltda

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 – Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2677-1500 - CGC: 30.450.803/0001-09 - Nº ANVISA 102.163-5

e-mail: zammi@zammi.com.br

Resp. Técnico: Romeu de Oliveira Guarany – CREA 016424/D

“ESTÉRIL - Esterilizado com óxido de etileno”

“PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR”

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350089