

CANETA PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA

CANETA PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA ZAMMI SKS

1. Descrição

Caneta de marcação cirúrgica confeccionada com tinta à base de violeta genciana, com propriedades antifúngicas e antibacterianas, garantindo assepsia no procedimento. Material não tóxico e não irritante, proporcionando conforto e segurança ao paciente. Possui ponta de 1mm, ideal para traços regulares e detalhados, acompanha régua de 12 cm, auxiliando na precisão das marcações.

Material esterilizado por Raio Gama, garantindo maior segurança no uso.

2. Princípio de funcionamento

Ao pressionar a caneta sobre a pele do paciente, o local da incisão ficará marcado pela tinta da caneta, facilitando o trabalho do cirurgião.

3. Indicação

Produto indicado para marcação precisa na pele dos pacientes antes de procedimentos cirúrgicos.

4. Composição

Tinta – À base de violeta genciana (menor que 1%)

Corpo da caneta – Polietileno

Tampa da caneta – Polietileno

Tampinha (Base da caneta) – Polietileno

Régua (Acessório) – Policloreto de Vinila

5. Instrução de uso

5.1. Marcação antes da antissepsia cirúrgica: limpar e secar a pele utilizando antisséptico alcoólico.

5.2. Marcação após a antissepsia cirúrgica: utilizar antisséptico aquoso, aplicando de forma ampla sobre a área marcada.

5.3. Marcar o local da incisão com caneta demográfica estéril.

Observação: a marcação pode desbotar parcialmente, mas permanecerá visível o suficiente para guiar a incisão.

5.4. Executar a incisão seguindo rigorosamente a linha marcada.

5.5. Remover eventuais manchas residuais com álcool a 70%, por fricção suave, se desejar. As marcas remanescentes desaparecerão naturalmente com o banho em poucos dias.

6. Advertências

Não reutilizar a caneta de marcação cirúrgica em diferentes pacientes, a fim de prevenir risco de infecção.

Não re-esterilizar.

Não utilize se o paciente for sensível a violeta genciana.

7. Precauções

7.1. Verificar cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade antes da utilização.

- 7.2. As condições de esterilidade estarão garantidas dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada, danificada ou úmida.
- 7.3. Inspeccionar visualmente o produto antes do uso para assegurar sua integridade.
- 7.4. Evitar manuseio inadequado, pois pode causar danos ao produto e comprometer seu desempenho.
- 7.5. Utilizar com cautela em mucosas ou áreas de pele lesionada, evitando irritações ou reações adversas.
- 7.6. Realizar teste prévio em pacientes com hipersensibilidade conhecida à violeta genciana, antes da aplicação direta.
- 7.7. É indicado que a marcação de pele seja realizada após a antissepsia da pele, porém quando a marcação é realizada antes da assepsia cirúrgica, devem ser utilizadas soluções aquosas a fim de evitar a sua remoção.

8. Acondicionamento

Armazene em local seco e fresco, protegido da luz solar direta.

9. Cuidados de conservação e transporte

Evite calor excessivo. Proteja da luz direta do sol e de umidade.
O transporte deve ser realizado em caminhões de carroceria fechada.

10. Descarte

Descartar o produto de acordo com a RDC nº 222/2018 – ANVISA ou regulamento que venha substituí-la.

11. Fabricado por

Shanghai Kearing Stationery Co.,Ltd Team 3, Yingqian Village, Chuansha Town, Pudong, 201202 – Shanghai – China

11. Importado e distribuído por

ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300
Telefone: (21) 2677-1500 - CNPJ: 30.450.803/0001-09 – I.E: 82.340.777 – ANVISA: 1021635

Estéril - Raio gama. Produto isento de látex.

“O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”

Para mais informações sobre nossos produtos acesse nosso site: **www.zammi.com.br**